

Gebruiksaanwijzing (2018)

Met aanpassingen door IMGRO Beauty

6090-E Orthofex Orthospray Pedicuremotor



De Ortho-Spray met uitneembaar reservoir biedt als professionele pedicuremotor vele voordelen voor zowel de voetverzorger/ster als de cliënt.

Door het gebruik van de Ortho-Spray is er sprake van een verbeterde hygiënische manier van werken in vergelijking met het werken zonder sprayvoorziening

De instelbare verneveling zorgt voor een pijnloze behandeling, een aangename verkoeling en een

voortdurende ontsmetting van de te behandelende locaties. Zo hechten de ontstane stofdeeltjes zich aan de minuscule druppeltjes (nevel). Deze manier van behandelen wordt als ontspannend en verkwikkend ervaren door de cliënt.

Door het reservoir naar u toe te trekken kunt u het tankje los schroeven en vullen met Orthospray vloeistof of gedemineraliseerd water. U kunt ook de vloeistoffen Podispray of gedemineraliseerd water (IMGRO) gebruiken. Het gebruik van andere vloeistoffen doet uw aanspraak op garantie vervallen. Let op dat het reservoir goed dichtgedraaid wordt en voorkom daarmee drukverlies zodat er een goede verneveling van de spray plaats kan vinden.

De vloeistofslang en de DIN-plug aan het handstuk worden op de volgende manier aangesloten in de unit. Als eerste neemt u de vloeistofslang en drukt deze in de aansluiting net zolang totdat u merkt dat hij niet meer verder kan. De DIN-plug kan er slechts op één manier in en dat is met het glimmende stukje naar boven. Om de vloeistofslang weer te verwijderen moet u het zwarte ringetje dat naar voren komt teruggedrukt houden, pas dan kunt u het slangetje er uittrekken. Tijdens het vervoer is het altijd raadzaam om het handstuk los te koppelen zodat er geen knikken in de zwarte slang en het 12V snoer kunnen komen.


www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.
tel 0252-527242

GEBRUIKSAANWIJZING ORTHO-SPRAY


U begint met een frees in het handstuk te doen . Volg hierbij de volgende stappen

- Houdt het dikke gedeelte (= achterhuis) stevig vast in 1 hand
- Pak het geribbelde buswielkje (= Spanmoer) tussen duim en wijsvinger
- Draai de spanmoer links (=klem) of rechtsom (ontklem)
- Als het goed is voel je een soort “hikje” in de draaislag. Dit “hikje” geeft aan dat de klem/ontklem is geactiveerd.

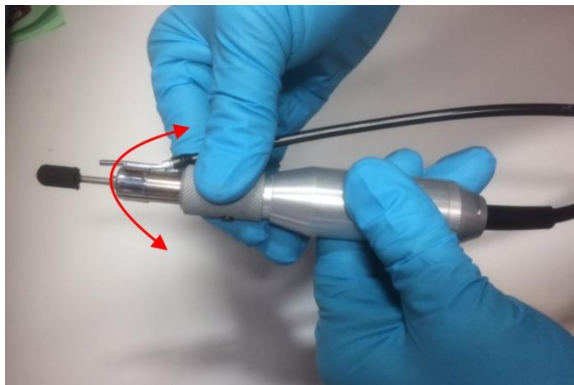

Als je het achterhuis (dikke deel) vasthoudt kan je de spanmoer een ¼-slag draaien. Met de klok mee is dan de klem sluiten en tegen de klok in is de klem openen. Als de klem open staat kan je de frees eruit halen en wisselen.

Tip: Leg een handstuk bij voorkeur nooit lang weg zonder frees in de klem. Zorg bij transport dat de frees in het handstuk NIET kan stoten, voorkom daarmee inwendige schade aan het handstuk.

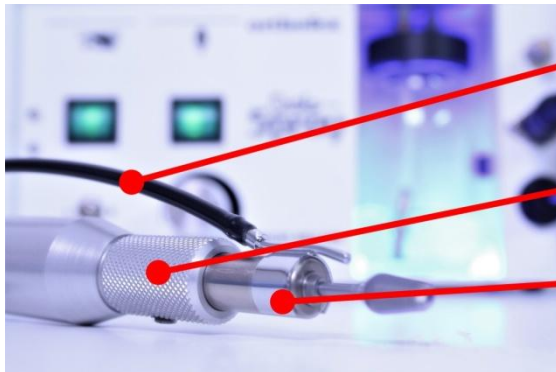

A = Sprayslang vanaf de kast

B = Aluminium spanmoer

C = Spraykopje Chroom

Nu wordt als eerste de hoofdschakelaar ingedrukt en met de regelknop kan het gewenste toerental van de frees worden ingesteld. Met schakelaar kunt u de gewenste draairichting instellen. Vervolgens wordt schakelaar ingedrukt om de spray in te schakelen en kunt u met regelknop de spray hoeveelheid instellen. Rechtsom is zachter en linksom is harder. Let op het duurt enige seconden voordat het spraysysteem op druk komt. Is de spraynevel correct ingesteld dan is het niet

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.
tel 0252-527242



noodzakelijk meer om deze stand weer te wijzigen zo gauw de machine uit is geweest en vervolgens weer wordt aangezet.

Wat te doen als mijn machine helemaal niks doet:

1. controleer uw eigen aansluit punt
2. controleer de hoofdzekering aan de achterzijde van het apparaat (zwartdopje) en vervang deze als het noodzakelijk is bij aanschaf van de machine zit 1 extra glaszekering geleverd in het zakje met stofkapjes.

Wat te doen als mijn handstuk het niet doet:

1. controleer of u het stekkertje goed heeft aangesloten.
2. controleer of schakelaar ingeschakeld is. (schakelaar licht op als hij aanstaat)
3. ook is het handstuk beveiligd met een automatische zekering als deze inwerking is zal het blauwe lampje achter het reservoir ook uitgeschakeld zijn. Als de zekering in werking is moet u de gehele machine voor ca. 1 minuut uitschakelen.
4. controleer of de toerental knop niet helemaal uitstaat.

Wat te doen als mijn spray het niet doet of niet goed werkt:

1. controleer of schakelaars niet uitgeschakeld zijn.
2. controleer of het reservoir goed aangedraaid is.
3. controleer of de sprayregelaar een beetje open gedraaid staat.
4. ook moet het spraykopje wat op het handstuk bevestigd is (waar de spray nevel uitkomt) schoongehouden worden. (Imgro adviseert NIET het kopje van de slang af te trekken, het kopje zou kunnen beschadigen)

Schoonmaak tips

- Maak nooit uw machine schoon met alcohol!!!!
- Gebruik voor de buitenkant van de kast en het handstuk en snoeren gewone water oplosbare multireiniger. Ditzelfde geldt voor het pedicure handstuk. Gebruik uitsluitend een vochtige doek met "reinigingsop", (geen vloeistoffen dus!!) en neem kast en handstuk af.
- De gekartelde spanmoer van het handstuk kunt u het beste met een frezen borstel schoonhouden.
- Het spraykopje kunt u ultrasoon reinigen of met alcohol reinigen. Het kopje kan niet "eenvoudig" verwijderd worden van de slang.

Garantie

Op nieuwe Orthofex motoren heb je maximaal 3 jaar garantie. De fabrieksgarantie is bepaald op 12 maanden vanaf aankoopdatum. Deze fabrieksgarantie kan worden verlengt met maximaal 2 x 12 maanden indien in de eerste 2 gebruiksjaren een jaarlijkse servicebeurt wordt uitgevoerd bij IMGRO Beauty.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren

Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

tel 0252-527242



Buiten de garantie vallen lampjes, zekeringen, draadbreek, ondeskundig gebruik, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf en reparaties door derden.

Garantie kan niet worden overgenomen bij ongeregistreerde doorverkoop aan derden.

Onderhoud aan uw machine:

Als officieel Orthofex dealer en servicepunt van Orthofex motoren adviseren wij 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Het handstuk en de stuurkast bevatten onderdelen die periodiek moeten worden gereinigd, afgesteld of zelfs moeten worden vervangen. IMGRO Beauty verzorgt in eigen werkplaats ook deze jaarlijkse servicebeurten. Onderhoud en reparaties aan je Orthofex pedicuremachines worden gedaan op afspraak in onze vestiging in Hillegom. Bel voor een afspraak of stuur je machine op naar IMGRO Beauty in Hillegom.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.
tel 0252-527242