

Gebruiksaanwijzing (2018)

Met aanpassingen door IMGRO Beauty

577-E Orthofex Micro Air Pedicuremotor



Met de Orthofex Micro Air heeft u de beschikking over een professionele pedicuremotor met stofafzuiging. De compacte uitvoering en het geringe totaalgewicht (± 3,3 kg) maken daarom de Micro Air ook zeer geschikt voor de ambulante praktijk. Door de krachtige afzuigmotor wordt freestof van nagels en eelt vrijwel voldoende afgezogen. Er zal echter altijd enig zwerfstof vrijkomen dat buiten het bereik van de aanzuigpijp wegddarrelt.

Een soepele siliconenslang vormt de verbinding tussen het ergonomische gevormde handstuk, waarin zich de hoogwaardige micro (frees)- motor bevindt, en de Micro- air unit. Het afgevangen stof wordt via de slang verzameld in het uitwisselbaar stofzakje in het compartiment in de stuurkast.

Een stofzakje wordt vervangen als “de buik “ van het zakje meer dan halfvol is. Voorkom dat een zakje scheurt of van de hechtbuis afschuift. Controleer elk dagdeel de vulling van het stofzakje en vervang indien nodig. Druk de grijze afzuigslang met een kleine draaibeweging op de aansluiting van het klepje van het stofkabinet.

Naast deze stofaansluiting bevindt zich de DIN-plug aansluiting waarin de DIN-plug wordt gestoken welke komt van het handstuk. Deze gaat slechts op één manier in de unit, lukt dit niet, draai de stekker dan een halve slag verder.

Stel de Links-Rechts schakelaar in de gewenste draairichting voor de frees. Let op dat deze schakelaar niet in de middenstand staat (hebben niet alle jaarseries van Orthofex maar het komt voor). In de middenstand is de micromotor in uw handstuk namelijk stroomloos en dus uit.!

Schakel de hoofdschakelaar in en met de regelknop kan het gewenste toerental van de frees worden ingesteld. Vervolgens wordt met de 2^e schakelaar de afzuigmotor gestart (of gestopt) , en met

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren

Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

tel 0252-527242

regelknop kan de afzuigkracht worden ingesteld. Het is echter overbodig om deze maximaal in te stellen.

Bij gebruik van een te volle stofzak of wanneer de afzuig huls op het handstuk dicht zit met stof (vuil), zal een automatische zekering de afzuigmotor voor ± 15 minuten uitschakelen. Vervang de stofzak. De afzuighuls wordt van het handstuk gedraaid door eerst de siliconenslang los te trekken. Verwijder nu al het vuil uit de afzuighuls.

GEBRUIKSAANWIJZING van het handstuk ORTHO-SPRAY/ geldt ook bij Afzuigmodel

U begint met een frees in het handstuk te doen . Volg hierbij de volgende stappen

- Houdt het dikke gedeelte (= achterhuis) stevig vast in 1 hand
- Pak het geribbelde buswiel (= Spanmoer) tussen duim en wijsvinger
- Draai de spanmoer links (=klem) of rechtsom (ontklem)
- Als het goed is voel je een soort “hikje” in de draaislag. Dit “hikje” geeft aan dat de klem/ontklem is geactiveerd.



Als je het achterhuis (dikke deel) vasthoudt kan je de spanmoer een ¼-slag draaien. Met de klok mee is dan de klem sluiten en tegen de klok in is de klem openen. Als de klem open staat kan je de frees er uit halen en wisselen.

De frees kop zal zich redelijk dichtbij het afzuigstuk moeten bevinden voor een optimale stofafzuiging.

Tip: Leg een handstuk bij voorkeur nooit lang weg zonder frees in de klem. Zorg bij transport dat de frees in het handstuk NIET kan stoten, voorkom daarmee inwendige schade aan het handstuk.



A = Schuifconnector siliconeslang en Afzuigbuis

B = Aluminium spanmoer

C = Afzuigbuis Chroom

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren
 Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.
 tel 0252-527242



Nu wordt als eerste de hoofdschakelaar ingedrukt en met de regelknop kan het gewenste toerental van de frees worden ingesteld. Met schakelaar kunt u de gewenste draairichting instellen. Vervolgens wordt schakelaar ingedrukt om de spray in te schakelen en kunt u met regelknop de spray hoeveelheid instellen. Rechtsom is zachter en linksom is harder. Let op het duurt enige seconden voordat het spraysysteem op druk komt. Is de spraynevel correct ingesteld dan is het niet noodzakelijk meer om deze stand weer te wijzigen zo gauw de machine uit is geweest en vervolgens weer wordt aangezet.

Wat te doen als mijn machine helemaal niks doet:

1. controleer uw eigen aansluit punt
2. controleer de hoofdzekering aan de achterzijde van het apparaat (zwartdopje) en vervang deze als het noodzakelijk is bij aanschaf van de machine zit 1 extra glaszekering geleverd in het zakje met stofkapjes.

Wat te doen als mijn handstuk het niet doet:

1. controleer of u het stekkertje goed heeft aangesloten.
2. controleer of schakelaar ingeschakeld is. (schakelaar licht op als hij aanstaat)
3. ook is het handstuk beveiligd met een automatische zekering als deze inwerking is zal het handstuk niet meer draaien. Als de zekering in werking is moet u de gehele machine voor ca. 1 minuut uitschakelen.
4. controleer of de toerental knop niet helemaal uitstaat.

Wat te doen als mijn afzuiger het niet doet of niet goed werkt:

1. controleer of schakelaar ingeschakeld en niet uitgeschakeld zijn.
2. controleer of het stofzakje niet te vol zit.
3. controleer of de afzuighuls niet vol zit met stof (vuil).

Schoonmaak tips

- Maak nooit uw machine schoon met alcohol!!!!
- Gebruik voor de buitenkant van de kast en het handstuk en snoeren gewone water oplosbare multireiniger. Ditzelfde geldt voor het pedicure handstuk. Gebruik uitsluitend een vochtige doek met "reinigingsop", (geen vloeistoffen dus!!) en neem kast en handstuk af.
- De gekartelde spanmoer van het handstuk kunt u het beste met een frezen borstel schoonhouden.
- De afzuigbuis kunt u ultrasoon reinigen of met alcohol reinigen. U kunt de afzuigbuis met een draaiende beweging van het handstuk verwijderen voor reiniging .

Garantie

Op nieuwe Orthofex motoren heb je maximaal 3 jaar garantie. De fabrieksgarantie is bepaald op 12 maanden vanaf aankoopdatum. Deze fabrieksgarantie kan worden verlengt met maximaal 2 x 12 maanden indien in de eerste 2 gebruiksjaren een jaarlijkse servicebeurt wordt uitgevoerd bij IMGRO

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren

Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

tel 0252-527242

Beauty.


Buiten de garantie vallen lampjes, zekeringen, draadbreek, ondeskundig gebruik, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf en reparaties door derden.

Garantie kan niet worden overgenomen bij ongeregistreerde doorverkoop aan derden.

Onderhoud aan uw machine:

Als officieel Orthofex dealer en servicepunt van Orthofex motoren adviseren wij 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Het handstuk en de stuurkast bevatten onderdelen die periodiek moeten worden gereinigd, afgesteld of zelfs moeten worden vervangen. IMGRO Beauty verzorgt in eigen werkplaats ook deze jaarlijkse servicebeurten. Onderhoud en reparaties aan je Orthofex pedicuremachines worden gedaan op afspraak in onze vestiging in Hillegom. Gevoond inleveren en afhalen kan ook zonder afspraak vóóraf.

Bel voor een afspraak of stuur je machine op naar IMGRO Beauty in Hillegom.

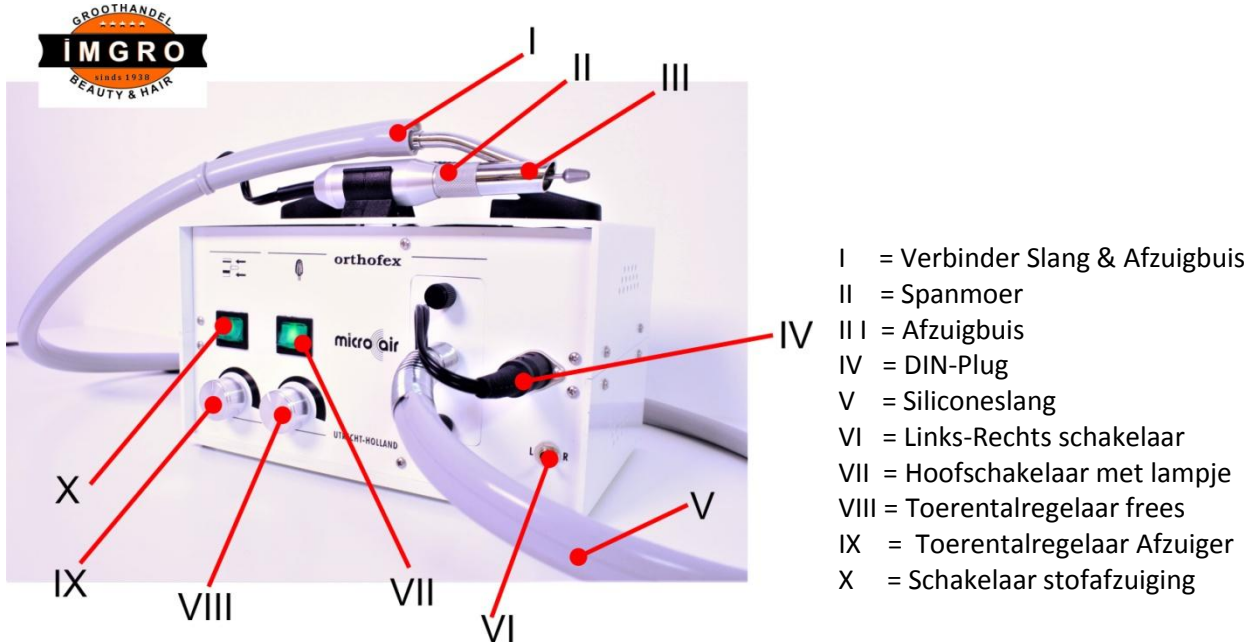

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor Orthofex pedicuremotoren

Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

tel 0252-527242