

Geen stalen haken of veren....

Werk je nog met stalen veren en clips? Bevestig je de nagelbeugels met moeizaam gevormde stalen draad? Een nieuwe versie van nagelcorrectie is BS-Spange. De spannerstrips van BS Spange maken het je mogelijk het behandelveld van ingegroeide nagels te vergroten, in het bijzonder direct toe te passen bij verwonde nagelwallen en diep ingegroeide teennagels..! Nu hoef je nooit meer stalen veren, clips of gevormd draad onder de vrij liggende nagelrand te schuiven.



Hoe werkt de BS Spange ?

De strips voor nagelcorrectie van BS Spange zijn vlakke, uit kunststof vervaardigde "bladveertjes". De BS Spange Strips uit de series Classic, Quick en Classic Magnet worden met het gehele vlak op de nagel gelijmd. Door de volledige verbinding tussen BS Spange Classic Strip en de nagel worden de veerkrachten vanuit de BS Spange Strip verdeeld over de gehele nagel. Hierdoor wordt voorkomen dat er nog langer vervelende drukbelasting in de nagel wordt gevormd of wordt gecontinueerd. De veerkracht van het hoogwaardige kunststof wordt omgezet in een effectieve correctiekracht in het nagelmateriaal. De klant merkt dit op korte termijn door een welhaast directe pijnvermindering. Op de lange duur zal de nagel een actieve "lift" ondervinden, in groeirichting wijzigen en niet meer in het nagelbed of nagelwallen snijden.

Cosmetische afwerking

Na plaatsing van de BS Spange strip vertoont de nagel een verhoging. Om kleine ongemak bij stoten of aantrekken van kousen e.d. op te lossen kan de wens bestaan de nagel cosmetisch af te werken. Laat de randen van de BS-Strip vollopen met Spange-lijm. Laat de lijm drogen en slijp met een fijne diamant-frees de rand netjes glad. Vervolgens kan de nagel gelakt worden. Indien de nagel met BS-

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
 Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV



Strip geheel vlak gemaakt dient te worden kan je de nagel afwerken met Acryltechnieken of UV-Geltechnieken.

Keuze uit BS Spange

Er zijn meerder soorten BS Spange leverbaar. Bernd Stolz GmbH (BS) heeft in de loop van de jaren een aantal innovaties toegepast die het product verbeteren en de plaatsing vereenvoudigen.

- **BS Spange Classic**
Normale strips, plaatsing met potloodstreepje en BS applicator
- **BS Spange H-vorm**
Gelijk aan BS Spange Classic maar met extra hechtvlak (H) aan de uiteinden.
- **BS Spange Quick**
Dikkere strips, plaatsing met aanbrengfolie
- **BS Spange Magnet**
Magnetische strips , 3mm breed. Plaasting met magneetapplicator 3mm
- **BS Spange +**
Magenetische strips, 4mm. Plaatsing met mageneetapplicator 4mm

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV

Gebruiksaanwijzing BS Spange Classic System

BS[®] SPANGE Classic

BS Classic: Probleemloos aanbrengen

Het aanbrengen van de BS-Spange strips is een eenvoudige routine in 7 stappen.


- **Stap 1 : Voorbereiding**



De nagelplaat wordt zo vlak mogelijk geslepen. De zijkanten van de nagel worden in beperkte mate afgeplat. Deze voorbereiding gebeurt in het kader van een normale pedicurebehandeling. Vervolgens meet je de breedte van de nagelplaat. Deze breedte - 1 a 2 mm bepaald de maat van de BS Spange die je gaat gebruiken

- **Stap 2: De juiste maat kiezen**

Uit 6 voorgestane formaten strips kies je de strip die de nagel overspant zonder de

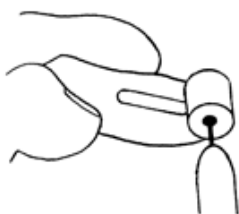

nagelwallen te raken. Houd hierbij links en rechts minimaal 1,5mm vrij. Het is aan te raden bij het passen een potloodstreepje te zetten op het midden van de Spange en de nagel zodat bij het vastlijmen de Spange Classic Strip goed gecentreerd kan worden geplaatst.

(Bij BS-Quick is het hulp streepje niet nodig)

Met een witte amaril-frees ,(ton vorm) ruw je de plakzijde van de

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
 Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV

BS Spange Classic strip iets op. De lijm zal hierdoor beter hechten

- **Stap 3: Ontvetten**

Gebruik BS Clean Ex om de nagel intensief te ontvetten. Gebruik hiervoor een vezelvrije celstofdepper van 4x5 cm en ontzie het potloodstreepje.

- **Stap 4: Drogen**

Gebruik de BS Aktivator Stift om de nagel intensief te drogen. “Stift” met lihcte kracht de gehele nagelplaat tot je zeker bent dat het hele oppervlak goed is “schoongeveegd”. Raak de nagel nu niet meer aan dan hoogstnoodzakelijk is.

- **Stap 5: Lijmen en aanbrengen.**




Houd de BS-Strip aan het uiteinde in een pincet.

Breng een druppel Spange-lijm over op de BS-Strip.

Plaats de BS-Strip over de nagel, houdt hierbij het potloodstreepje op de BS-Strip en nagel gelijk.

- **Stap 6: Vastzetten**

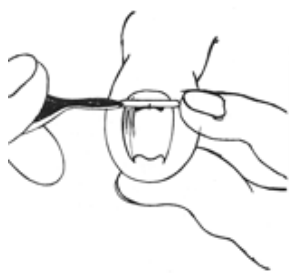

Gebruik de holle zijde van de BS-applicator om de BS-Strip in het midden aan te drukken.

Na ca. 4 seconden kun je de uiteinden van de BS-Strip vastdrukken met de holle zijde van de BS-applicator. Het instrumentje is speciaal ontwikkeld door Bernd Stolz. Het hole uiteinde verkleint het “contactoppervlak”.

Je voorkomt hiermee dat je spatel vastraakt aan de BS-Strip.



Hierna druk je met het holle uiteinde van de applicator zowel links als rechts de strip vast met lijm op de nagel.

Druk altijd even een paar seconden zodat je zeker bent van een

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
 Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV



degelijke verlijming

- **Stap 7: Nabehandeling en cosmetisch afwerken**

Breng met het lijmkwastje de BS Spange Kleber (lijm) aan in een “verfbeweging”.. Strijk in distale richting(van de nagel af). Laat de lijm drogen. Uiteindelijk kan je het lijmvlak op de nagel ook nog een beetje vlak vijlen.

Tip: Afwerken met gel of acryl natuurlijk ook. Onze ervaring hiermee is heel positief, vooral omdat je dan de nagels in een mooie kleur met lak of Hybrid lak (Pierre René) kan kleuren.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV



Gebruiksaanwijzing BS Spange Quick System



Hoe werkt de BS Spange Quick ?

De BS Spange Quick is een aangepaste versie van de BS Spange Classic. De BS Spange Quick zitten per 5 strips verpakt op een handige aanbrengfolie. De verbetering zit 'm vooral in de manier van opplakken waarbij ten 1^e géén potloodstreepje meer nodig is en ten 2^e de lijmactie + aandrukken met meer controle kan worden uitgevoerd.

BS-Quick: Probleemloos aanbrengen

Het aanbrengen van de BS Spange Quick Strips is een eenvoudige routine in 6 stappen.

- **Stap 1: Voorbereiding**
De nagelplaat wordt zo vlak mogelijk geslepen. De zijkanten van de nagel worden in beperkte mate afgeplat. Deze voorbereiding gebeurt in het kader van normale pedicurebehandeling.
- **Stap 2: De juiste maat kiezen**
Uit 6 voorgestane formaten strips kies je de strip die de nagel overspant zonder de nagelwallen te raken. Houd hierbij links en rechts minimaal 1,5mm vrij. (Een potloodstreepje is dus niet meer nodig)
- **Stap 3: Ontvetten**
Gebruik BS Clean Ex om de nagel intensief te ontvetten. Gebruik hiervoor een vezelvrije celstofdepper van 4x5 cm.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV



- **Stap 4: Drogen**

Gebruik de BS Aktivator Stift om de nagel intensief te drogen. “Stift” met lichte kracht de gehele nagelplaat tot je zeker bent dat het hele oppervlak goed is “schoongeveegd”. Raak de nagel nu niet meer aan dan hoogstnoodzakelijk is.

- **Stap 5: Lijmen en aanbrengen.**

- Knip de te gebruiken BS Quick Strip met folie los van de overige Strips zodat je 1 strip met folie hebt om mee te werken. Houd de aanbrengfolie met pincet of tussen de vingers vast en breng een streepje lijm aan op de Quick strip. Plaats de BS Quick Strip over de nagel zodanig dat je de aanbrengfolie bovenop hebt liggen. Druk met de vingers de aanbrengfolie + BS Quick Strip aan tot de lijm droog is. Nu trek je de aanbrengfolie “ruggelings” en voorzichtig los van de vastgelijmde BS Quick Strip.
- De BS Quick Strip vertoont zich nu als een verhoging op de nagelplaat. Doseer een heel klein beetje lijm langs de randen van de BS Quick Strip. Pas hierbij op dat je de nagelwallen niet raakt of vastlijmt.

- **Stap 6 : Nabehandeling & cosmetisch afwerken**

Breng met het lijmkwastje de BS Spange Kleber (lijm) aan in een “verfbeweging”.. Strijk in distale richting(van de nagel af). Laat de lijm drogen. Uiteindelijk kan je het lijmvlak op de nagel ook nog een beetje vlak vijlen.

Tip: Afwerken met gel of acryl natuurlijk ook. Onze ervaring hiermee is heel positief, vooral omdat je dan de nagels in een mooie kleur met lak of Hybrid lak (Pierre René) kan kleuren.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV

Gebruiksaanwijzing BS Spange Classic Magnet



Hoe werkt de BS Spange Classic Magnet ?

De BS Spange Classic Magnet is een aangepaste versie van de BS Spange Classic. De BS Spange Classic Magnet zitten per 10 strips los verpakt in een gripszakje. De verbetering zit 'm vooral in de manier van opplakken met behulp magnetisme. De strips zijn allen voorzien van een ijzerplekje in het midden van de strip. Gebruik een speciale applicator met magneetje om de strips op te plakken, voor te lijmen en te plaatsen op de nagelplaat. De voorbereiding en afwerking verschillen ook iets van de BS Spange Classic

2 uitvoeringen

De magneet uitvoering van BS Spangen wordt geleverd in een uitvoering

- **Classic Magnet is 3mm breed**
- **Classic Magnet is 4mm breed**

De werkwijze van de 3 en de 4mm is gelijk.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV



BS Classic Magnet: Probleemloos aanbrengen

Het aanbrengen van **BS Spange Classic Magnet** is een eenvoudige routine in 6 stappen.

- **Stap 1 : Voorbereiding**
De nagelplaat wordt zo vlak mogelijk geslepen. De zijkanten van de nagel worden in beperkte mate afgeplat. Deze voorbereiding gebeurt in het kader van normale pedicurebehandeling.
- **Stap 2 : Maat selecteren**
uit de voorgestane formaten strips kies je de strip die de nagel overspant zonder de nagelwallen te raken. Houd hierbij links en rechts minimaal 1,5mm vrij.
Om de juiste maat te bepalen meet je met het uiteinde van de applicator de breedte van de nagelplaat. Maak met het uiteinde een “rollende” beweging over de nagelplaat. De applicator die bij beide nagelwallen 1,5mm overlaat is de juiste maat voor de te behandelen nagel.

Tip: De magneet-applicatoren zijn per stuk te gebruiken voor 2 maten BS Spange Classic Magnet Strips. Elk uiteinde van de BS Spange applicator is geschikt voor één bepaalde maat Strip. Zorg ervoor dat je voor elke maat een passende applicator en passende BS Spange Classic Magnet Strip klaar hebt liggen.
- **Stap 3: Ontvetten**
Gebruik BS Clean Ex om de nagel intensief te ontvetten. Gebruik hiervoor een vezelvrije celstofdepper van 4x5cm.
- **Stap 4: Drogen.**
Gebruik de BS Aktivator Stift om de nagel intensief te drogen. “Stift” met lichte kracht de gehele nagelplaat tot je zeker bent dat het hele oppervlak goed is “schoongeveegd”. Raak de nagel nu niet meer aan dan hoogstnoodzakelijk is.
- **Stap5: Aanbrengen**
Bij stap 1 heb je de juiste maat van de BS Spange Classic+ Magnet Strip bepaald. Plak “magnetisch” met behulp van de Magnet-applicator één strip op. Houd de BS Spange Classic+Magnet Strip met de te lijmen kant naar boven. Doseer een streepje lijm op de strip. Breng nu de BS Spange+ Magnet Strip aan op de nagelplaat. Werk hierbij van nagelwal naar

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV



nagelwal in een “rollende en rustige” beweging. Tijdens het plaatsen voer je lichte druk uit zodat de lijm en strip goed in contact komen met de nagelplaat.

Geef de strip even de tijd om zich te “zetten”. En de drogen. De temperatuur van de nagelplaat verschilt altijd van de temperatuur van de strip en de lijm. De BS Spange Classic+ Magnet Strip toont nu nog duidelijk het ijzervlakje. Na bijvoorbeeld 1 minuut veeg je de strip schoon met een celstofdepper 4x5cm en BS Spange Clean Ex. Het donkere ijzervlekje op de strip zal op deze wijze zonder veel moeite verdwijnen.

- **Stap 6 : Nabehandeling & Cosmetisch afwerken**

Breng met het lijmkwastje de BS Spange Kleber (lijm) aan in een “verfbeweging ” in distale richting (van de nagel af). Laat de lijm drogen. Uiteindelijk kan je het lijmvlak op de nagel ook nog een beetje vlak vijlen.

Tip: Afwerken met gel of acryl kan natuurlijk ook. Onze ervaring is hiermee heel positief, vooral omdat je dan de nagels in een mooie kleur met lak of UV-Colorgel (Hybrid colors) kan kleuren.

www.ALLESVOORDESALON.com

IMGRO Beauty, Specialist voor BS Spange
Einsteinstraat 7-9, 2181 AA Hillegom.

© Copyright / all rights reserved 2018 IMGRO Beauty BV